



Hochqualitativer Manuka Honig
Herausragende Resultate
Kostengünstige Wundpflege








MANUKAMED®

MANUKAMED – EIN KOMPLETTES WUNDPFLEGESYSTEM

	PRODUKTNAME / CODE	BESCHREIBUNG	PACKUNG	DIMENSIONEN	HCPCS	EXUDATABSORPTIONSSTÄRKE
	ManukaTex MM0010	Honig imprägnierte sterile Acetatgaze	10/Box - 20 Box/VE	4"x5" 10x12.5cm	A6403	
	ManukaTex Roll MM0012	Honig imprägnierte sterile Acetatgazenrolle	4/Box - 6 Box/VE	4"x48" 10x122cm	N/A	
	ManukaHD Super Lite MM0070	Honig imprägniertes super absorbierendes Geliefaserkissen	10/Box - 20 Box/VE	2"x2" 5x5cm	A6196	
	ManukaHD Super Lite MM0071	Honig imprägnierte super absorbierende Geliefaserrolle	10/Box - 20 Box/VE	4"x5" 10x12.5cm	A6197	
	ManukaHD Super Lite Roll MM0074	Honig imprägnierte super absorbierende Geliefaserrolle	4/Box - 6 Box/VE	4"x48" 10x122cm	N/A	
	ManukaHD Super Lite Rope MM0073	Honig imprägniertes super absorbierendes Geliefaserseil	10/Box - 20 Box/VE	0.5"x18" 1.25x45cm	A6199	
	ManukaHD Lite MM0030	Honig imprägniertes super absorbierendes Geliefaserkissen	10/Box - 20 Box/VE	2"x2" 5x5cm	A4649	
	ManukaHD Lite MM0031	Honig imprägniertes super absorbierendes Geliefaserkissen	10/Box - 20 Box/VE	4"x5" 10x12.5cm	A4649	
	ManukaHD Lite Rope MM0033	Honig imprägniertes super absorbierendes Geliefaserseil	10/Box - 20 Box/VE	1/2"x18" 1.2x47.5cm	A4649	
	ManukaHD MM0013	Honig imprägniertes super absorbierendes Geliefaserkissen	10/Box - 20 Box/VE	2"x2" 5x5cm	A4649	
	ManukaHD MM0017	Honig imprägniertes super absorbierendes Geliefaserkissen	10/Box - 20 Box/VE	4"x5" 10x12.5cm	A4649	
	ManukaMed MedSaf / Roll MM00121	Super absorbierender Faservernetzter Wundverband für stark exudierende Wunden	10/Box - 20 Box/VE	4"x5" 10x12.5cm	A6197	
	ManukaMed MedSaf / Roll MM00122	Super absorbierender Faservernetzter Wundverband für stark exudierende Wunden	4/Box - 6 Box/VE	4"x39" 10x99cm	A6198	
	ManukaPli MM0049	100% Manuka Honig Medizinische Qualität	10/Box - 10 Box/VE	2x0.5oz (15ge) Tuben	A4649	N/A
	ManukaPli MM0051	In einer Tube	5/Box - 10 Box/VE	1x1.5oz (44ge) Tuben	A4649	N/A
	ManukaDerm MM0053	Hautschutz Creme mit 30% Medizinischer Qualität 2% Dimethicone	6/Box - 6 Box/VE	1.75 oz (50gr) Tuben	N/A	N/A

*A6196, A6197, A6199 – Medicare Teil B abgedeckt - Fixes gebührencodiertes Calciumalginat mit gelierenden Fasern, *A4649 – Surgical Supply Miscellaneous.

PRODUKTOPTIONEN NACH WUNDTYP

WUNDE		KEIN BIS WENIG EXUDAT	MÄSSIG BIS REICHLICHES EXUDAT	KOMPRESSIONS-THERAPIE	NPWT	TUNNELN UND UNTERHÖHLEN
VENÖS		ManukaTex täglich. Falls nötig mit ManukaPli befeuchten Abdecken mit sekundärem Wundverband.	ManukaHD für 5-7 Tage ManukaHD Lite für 1-3 Tage oder ManukaHD Super Lite täglich. Abdecken mit Sekundären Wund Verband a (MedSaf).	ManukaHD oder ManukaHD lite. Einwickeln und komprimieren per Protokoll und sichere ABI.	ManukaTex für NPWT-Verbände nach Protokoll und wechseln bei Bedarf.	Zuschneiden und leichtes Einpacken mit ManukaHD Lite Rope oder ManukaHD Super Lite Rope. Abdecken mit MedSaf. und sekundärem Verband
DIABETISCH		ManukaTex täglich. Falls nötig vorbefeuchten mit ManukaPli. Abdecken mit sekundärem Verband.	Manuka HD für 5-7 Tage oder ManukaHD Lite für 1-3 Tage oder ManukaHD Super Lite täglich. Abdecken mit sekundärem Verband (MedSaf).	N/A	ManukaTex für NPWT-Verbände nach Protokoll und wechseln bei Bedarf	Zuschneiden und leichtes Einpacken mit ManukaHD Lite Rope oder Manuka HD Super Lite Rope. Abdecken mit MedSaf. und sekundärem Verband
DRUCK		ManukaTex täglich. Falls nötig vorbefeuchten mit ManukaPli. Abdecken mit sekundärem Verband.	Manuka HD für 5-7 Tage oder ManukaHD Lite für 1-3 Tage oder ManukaHD Super Lite täglich. Abdecken mit sekundärem Verband (MedSaf).	N/A	ManukaTex für NPWT-Verbände nach Protokoll und wechseln bei Bedarf	Zuschneiden und leichtes Einpacken mit ManukaHD Lite Rope oder ManukaHD Super Lite Rope. Abdecken mit MedSaf. und sekundärem Verband
ARTERIELL		ManukaTex täglich. Falls nötig vorbefeuchten mit ManukaPli. Abdecken mit sekundärem Verband.	ManukaHD für 5-7 Tage oder ManukaHD Lite für 1-3 Tage. Abdecken mit sekundärem Verband (MedSaf).	N/A	ManukaTex für NPWT-Verbände nach Protokoll und wechseln bei Bedarf	N/A
TRANS-PLANTIERTE HAUT		ManukaTex täglich. Falls nötig Vorbefeuchten mit ManukaPli. Abdecken Verband.	ManukaHD Für 5-7 Tage. ManukaHD Lite für 1-3 Tage. Abdecken mit sekundärem Verband (MedSaf).	N/A	ManukaTex für NPWT-Verbände nach Protokoll und wechseln bei Bedarf	N/A



HERAUSRAGENDE RESULTATE, BESSERE ERGEBNISSE

ManukaMed Wundverbände sind die einzigen Honig-Pflegeprodukte auf dem Markt, die einen patentierten Entzündungshemmer enthalten.

Entzündungshemmender Effekt

Durch Analyse bekannter Entzündungsmediatoren in Wunden haben Forscher herausgefunden, dass Manuka Honig effektiv beim Verringern von Entzündungen und Ödemen wirkt. Klinische Wirkungen umfassen Schmerzreduktion und eine immunmodulatorische Wirkung auf die Stimulation von TNF α , IL-1B und T6Fa durch Monozyten.

Autolytisches Debridement

Erhöht Plasminaktivität durch Hemmung des Plasminaktivitätenhemmers (PAI), der das Fibringerinnsel verdaut. Dies löst abgestorbenes und nekrotisches Gewebe aus dem Wundbett. Osmotische Aktivität zieht Lymphflüssigkeit ins Gewebe und unterstützt die Loslösung des nekrotischen Gewebes, um es einfacher zu entfernen.²


Gleichbleibende und hochgradige Bioaktivität

Methylglyoxal (MGO) ist eine Verbindung, die nur in Manuka Honig gefunden wird. Um als medizinischer Honig eingestuft zu werden, ist ein MGO-Wert 300+ (Mindestgehalt 300mg/pro Kilo)

Ref: White, Oct 2017, Volume 1, Issue 4, Wound Source.

² Molan, Peter. The Debriding Action of Honey on Wounds. Poster präsentiert an: New Zealand Conference of Primary Health Care Nurses, 2014.

³ A. Seckam and R. Cooper, "Understanding how honey impacts on wounds: an update on recent research findings," Wounds International, vol. 4, no. 1, pp. 20–24, 2013.



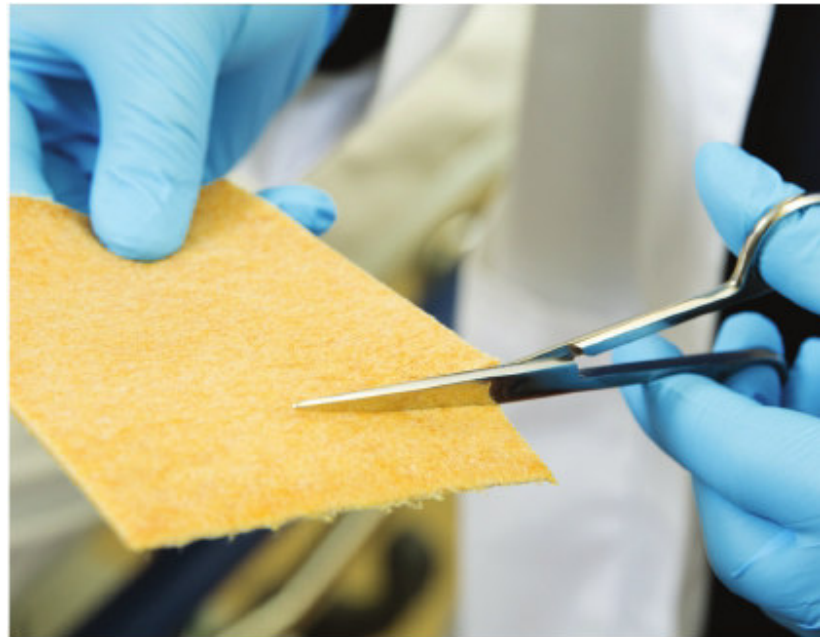
“Einige der Vorteile, die meine Patienten durch den Gebrauch von Manuka Honig erhalten, sind ein verringerter Biofilm, verringerte Schmerzen, eine verringerte Wundheilungszeit und eine verringerte Infektion – dies macht den Honig zu einem wunderbaren Wundverband.“





STEPHEN BERGQUIST, MD, CWSP

Jackson-Madison County Hospital
Jackson, Tennessee

MANUKAMED HONIG WUNDVERBAND – MACHT DEN UNTERSCHIED

- **Wirksame Versorgung der Wunde mit Honig** während Exudat und Fremdkörper bzw. mögliche Mikroben schnell herausgezogen werden.
- **Unsere Verbände behalten Ihre Integrität während Anwendung und Entfernung**
- **Mit 100% Leptospermum Scoparium Manuka Honig** und gleichbleibender Bioaktivität sorgen unsere Wundverbände für ein optimales Wundheilungsmilieu.



ZU HEILENDER WUNDRAND	GEWEBE NICHT LEBENSFÄHIG ODER MANGELHAFT	INFEKTION ODER ENTZÜNDUNG	FEUCHTIGKEITS UNBALANCIERT	WUNDRAND NICHT FORTSCHREITEND ODER UNTERHÖHLT
WUNDE				
EMPFOHLENER MANUKAMED VERBAND	ManukaPli kombiniert mit - ManukaTex - ManukaHD Lite - ManukaHD Super Lite - ManukaHD	ManukaPli kombiniert mit - ManukaTex - ManukaHD Lite - ManukaHDSuperLite - ManukaHD	Trocken ManukaPli Feucht ManukaHDLite ManukaHD Super Lite ManukaHD	ManukaPli kombiniert mit - ManukaTex - ManukaHD Lite - ManukaHD Super Lite - ManukaHD als Zusatz zu modernen Technologien zum Wundverschluss



IHR ANSPRECHPARTNER

Für alle Fragen rund um
das Thema Wundpflege

DIE KOSTENGÜNSTIGSTE & NATÜRLICHSTE ART DER WUNDPFLEGE

Preiswerte Wundpflege, das kompletteste Portfolio für eine kontinuierliche Wundpflege vom ersten Tag an.

- Durch den Gebrauch von ManukaMed Verbänden, können Krankenhäuser und Langzeitpflegeeinrichtungen **signifikante Einsparungen** mit herausragenden Ergebnissen erzielen und zudem den Bedarf an multiplen Produkten senken.
- Die Kombination von Manuka Honig und unserer exklusiven super absorbierenden Faser (SAF) ermöglicht ein **kosteneffektives Exudatmanagement** und eine Tragedauer von bis zu 7 Tagen, abhängig von der Exudatsmenge.
- Manukamed ist der einzige Hersteller, der seine **firmeneigenen Honig-Produkte** *vollständig* selbst verwaltet. Deshalb können wir Ihnen die Reinheit, Wirksamkeit und Zusammensetzung unserer Produkte garantieren. Diese Faktoren sind notwendig, um schwierigste und sehr komplexe chronische Wunden erfolgreich zu behandeln.

HÖCHSTE QUALITÄT MANUKA HONIG PRODUKTE



BESUCHEN SIE:

www.manukamed.de

Manukamed **Honigprodukte** – Höchste Bioaktivität und gleichbleibende Qualität

- ManukaMed verwendet strenge Qualitätskontrollen, unterstützt von zertifizierten Laborergebnissen von IANZ akkreditierten Laboratorien nach ISO 17025. Dies gewährleistet, dass wir Ihnen stets höchste und gleichbleibende Qualität unserer Honigprodukte anbieten können.
- ManukaMed-Forscher und Wissenschaftler arbeiten Eng mit zertifizierten Ärzten und Wundheilungsspezialisten zusammen, mit dem Ziel, klinische Protokolle für den Gebrauch unserer Wundpflegeprodukte zu verbessern und zu standardisieren.



MANUKAMED



MANUKAMED®

ManukaMed-Produkte sind für chronische und akute Wunden geeignet. Unsere Verbände zielen darauf ab, den Patienten eine optimale Wundversorgung zu ermöglichen.

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE
MANUKAMED.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:**

ManukaMed USA LLC
ussales@manukamed.com
+1-800-881-3654

ManukaMed NZ
sales@manukamed.com
+64-6-370-8824

ManukaMed Germany
info@manukana.de
+49-176-30130686



ManukaMed und das ManukaMed Logo-Design sind eingetragene Marken von ManukaMed Limited Partnership Neuseeland. Alle Rechte vorbehalten.

PI.425.03